

## Systemanforderungen DIGORA für Windows

(aktuelle Version: 2.8 / Stand 11/2011)

**Server:** Betriebssystem Microsoft Server 2000/2003/2008

**Ältere Digora-Installationen, bis und mit DfW 2.5/Rev.0, sind nicht mit dem Microsoft Server 2003/2008 kompatibel!**

In solchen Fällen wird dringend empfohlen mit uns Kontakt aufzunehmen.

**Ab DfW 2.7 werden auch 64-Bit Server-Systeme unterstützt!**

Je nach Installation werden mehrere fixe IP's (10) benötigt.

Bei Installationen von Cranex und PCT muss der Switch auch 10Mbit/sec. verarbeiten können.(Vorsicht bei Giga-Switches!)

Allfällige Virens Scanner und Firewalls müssen so konfiguriert werden, dass keine Konflikte mit Digora entstehen.

**Datenbank:** Die Daten werden in einer Solid-Datenbank auf dem Server verwaltet. Bei der Installation, muss das Admin-Passwort des Servers bekannt sein. Besser ist, wenn der Systemadministrator während der Installation vor Ort ist. Ein geeignetes Backupsystem muss vorhanden sein.

**Client:** Betriebssystem Windows XP Pro, Vista und Windows7 32Bit und 64Bit (ab DFW 2.7)

Lokale Administratorenrechte auf allen Digora Clients

Pentium IV / 2.0 GHz oder höher

Mindestens 1GB RAM, falls noch andere Programme auf dem Client laufen, werden mindestens 2GB empfohlen.

17" Monitor (mind. 1024x768) welcher die Schweizer Prüfnorm erfüllt.

**Digora** Freier PCI-Anschluss am PC, Verbindungskabel 1,5m lang  
**Digora FMX** Digora- und DigoraFMX-Scanner werden von Vista und Windows7 nicht unterstützt

**OPTIME:** Netzwerkanschluss RJ45, alternativ kann auch eine zweite Netzwerkkarte im PC eingebaut sein. Fixe IP für das Gerät und den PC

**PCT:**

**Cranex** Netzwerkanschluss RJ45, alternativ kann auch eine zweite Netzwerkkarte im PC  
**ExcelD:** eingebaut sein. Fixe IP für den PC, da eine zusätzliche Range (192.168.240...) vergeben werden muss. Das Cranex hat die fixe IP 192.168.240.17

**Cranex D:** Freier PCI-Anschluss am PC  
Standard Glasfaserkabel max. 10m im Lieferumfang enthalten

**TOTO:** USB 2

**VIDI:** USB 2 (wird von 64-Bit Systemen nicht unterstützt)



JORDI RÖNTGENTECHNIK AG

Dammstrasse 70  
CH-4142 Münchenstein

Tel. +41 (0)61 417 93 93  
Fax +41 (0)61 417 93 94

[www.rxtech.ch](http://www.rxtech.ch)